

Maxi Sky 1000

Elevar da posição sentada



1



Coloque a funda à volta do paciente, com a base da funda ligeiramente abaixo da espinha dorsal.

Para fundas com apoio para a cabeça, estenda até ao topo da cabeça do paciente.

2



Puxe cada extensão das pernas por baixo de cada coxa, até que as mesmas emergjam na parte de dentro das coxas.

Aproxime-se do paciente com o elevador.


Coloque a barra de suporte na posição sentada.

Coloque a barra de suporte ao nível dos ombros ou imediatamente abaixo.

Coloque a barra de suporte suficientemente perto para poder fixar as extensões dos ombros.

3

 Funda com alças

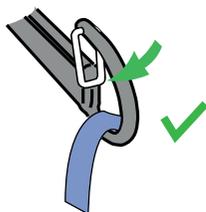

Coloque a alça de fixação no gancho.

Certifique-se de que os trincos de segurança estão fechados e de que a extensão da funda está totalmente dentro do gancho.

4



Prenda os elos da funda à barra de suporte. Prenda as extensões para os ombros e depois as extensões para as pernas.

Eleve o paciente e prossiga com a transferência.

Baixe para a nova localização. Quando o peso do corpo estiver totalmente apoiado, solte os elos.

Transferência a partir da posição de decúbito dorsal

1



Role o paciente e coloque-o de lado. Dobre a funda ao meio e coloque-a na cama, ao longo das costas do paciente.

Para fundas com apoio para a cabeça, estenda até ao topo da cabeça do paciente.

2


Role o paciente de novo para a funda e, depois, role-o na direção oposta, de modo a que a parte da funda dobrada possa ser desdobrada.

Aproxime-se do paciente com o elevador.

Coloque a barra de suporte suficientemente perto para poder fixar as extensões dos ombros.

3

 Funda com alças

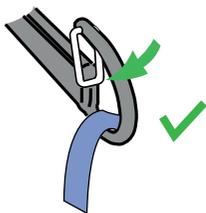

Coloque a alça de fixação no gancho.

Certifique-se de que os trincos de segurança estão fechados e de que a extensão da funda está totalmente dentro do gancho.

4


Fixe os elos da funda à barra de suporte. Prenda as extensões para os ombros e depois as extensões para as pernas.

Eleve o paciente e prossiga com a transferência.

Baixe para a nova localização. Quando o peso do corpo estiver totalmente apoiado, solte os elos.

Eleve da posição sentada - Aplicação da funda bariátrica

1

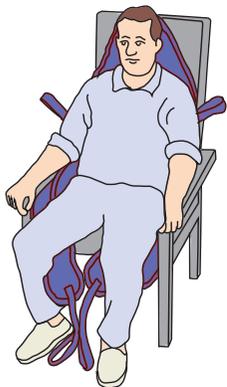

Coloque a funda à volta do paciente, com a base da funda ligeiramente abaixo da espinha dorsal.


Para fundas com apoio para a cabeça, estenda até ao topo da cabeça do paciente.

Puxe cada extensão das pernas por baixo de cada coxa, até que as mesmas emerjam na parte de dentro das coxas.

2



Funda com alças

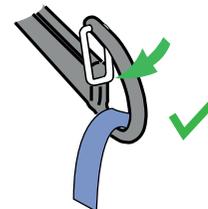

Coloque a alça de fixação no gancho.

Certifique-se de que os trincos de segurança estão fechados e de que a extensão da funda está totalmente dentro do gancho.

3



Prenda os elos da funda à barra de suporte.

Eleve o paciente numa posição semi-reclinada para a transferência.

Inicie a transferência.

4



Baixe para a nova localização. Quando o peso do corpo estiver totalmente apoiado, solte os elos.

Transfira da posição decúbito dorsal - Aplicação da funda bariátrica

1



Role o paciente e coloque-o de lado. Dobre a funda ao meio e coloque-a na cama, ao longo das costas do paciente.

Para fundas com apoio para a cabeça, estenda até ao topo da cabeça do paciente.

2




Role o paciente de novo para a funda e, depois, role-o na direção oposta, de modo a que a parte da funda dobrada possa ser desdobrada.

Aproxime-se do paciente com o elevador.

Coloque a barra de suporte suficientemente perto para poder fixar as extensões dos ombros.

3

 Funda com alças

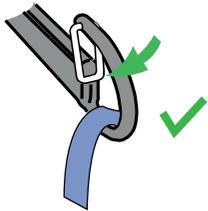

Coloque a alça de fixação no gancho.

Certifique-se de que os trincos de segurança estão fechados e de que a extensão da funda está totalmente dentro do gancho.

4

Fixe os elos da funda à barra de suporte.

As extensões devem ser passadas sob as coxas. Isto pode implicar o levantamento de uma perna de cada vez e pode significar baixar um pouco mais a barra de suporte.

Eleve o paciente numa posição semi-reclinada para a transferência.

Baixe para a nova localização. Quando o peso do corpo estiver totalmente apoiado, solte os elos.